


MASCARILLAS NIÑO

LAVABLES/REUTILIZABLES 5UD.

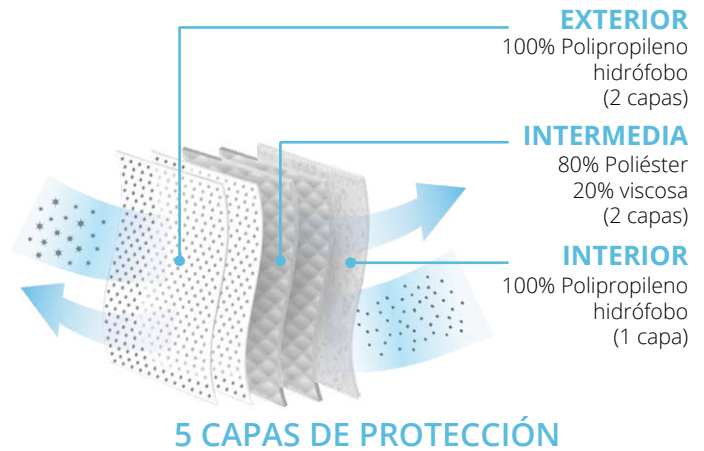

Mask // Masque facial // Mascarar // Maschera // Maske	
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	Higiénica reutilizable
Composición // Composition // Composition // Composição // Composizione // Zusammensetzung	Polipropileno hidrófobo, poliéster y viscosa
Con // With // Avec // Com // Con // mit	5 Capas
Clip nasal // Nasal clip // Clip nasale // Clipe nasal // Clip nasale // Nasenclip	Ajustable
Talla // Size // Taille // Dimensão // Dimensione // Größe	L / 10-12 años / 17x8.5cm
Uso // Use // Utiliser // Usar // Uso // Verwenden	Personal
Lavable-reutilizable // Washable-reusable // Lavable-réutilisable // Lavável-reutilizável // Lavabile-riutilizzabile // Waschbar-Wiederverwendbar	Sí
Hasta // Until // Jusqu'à // Até // Fino a // Bis	5 lavados
BEF (Eficiencia filtración bacteriana) // BEF (Bacterial filtration efficiency) // BEF (Efficacité de filtration bactérienne) // BEF (Eficiência de Filtração Bacteriana) // BEF (efficienza di filtrazione batterica) // BEF (Bakterielle Filtrationseffizienz)	98.7%
PA/cm ² (Presión Diferencial) // PA/cm ² (Differential pressure) // PA/cm ² (Pression différentielle) // PA/cm ² (Pressão diferencial) // PA/cm ² (Pressione differenziale) // PA/cm ² (Differenzdruck)	25
Homologada // Approved // Approuvé // Aprovado // Approvato // Genehmigt	Sí
Certificado // Certificate // Certificat // Certificado // Certificato // Zertifikat	UNE-0065-1 : 2020
Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	5

*Nota: las edades de las tallas de los niños son orientativas.

MASCARILLAS NIÑO

LAVABLES/REUTILIZABLES 5UD.



RETIRADA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.



2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.



4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.



5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.



7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.

8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.



9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



LAVADORA
A 60° MAX.



SE PUEDE LAVAR
USANDO LEJÍA



SECADORA BAJA
TEMPERATURA



PLANCHA BAJA
TEMPERATURA